

Instrukcja pobrania i przesłania materiału do badania - VagiStatus

Pobranie materiału:

UWAGA: wymaz należy pobrać między 10 a 14 dniem cyklu. Po menopauzie, przed pokwitaniem lub w przypadku zlecenia tylko VagiStatus Onko dzień pobrania nie ma znaczenia. Nie należy pobierać wymazu w czasie trwania krwawienia miesięcznego.

Materiał do badania z kanału szyjki macicy i pochwy powinien być pobierany wyłącznie przez lekarza (np. ginekologa) lub inną osobę wykwalifikowaną (np. położną). Pobranie może nastąpić w dowolnej placówce opieki medycznej (gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, przychodnia lekarska itp.). Przeciwwskazaniem do badania jest przyjmowanie antybiotyków i/lub leków przeciwgrzybiczych aktualnie lub w ostatnich 2 tygodniach przed badaniem, chyba że lekarz zaleci inaczej.

PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO POBRANIA WYMAZU

- Przez okres 48 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne ograniczyć do podmycia delikatnym płynem myjącym lub wodą podczas toalety całego ciała, nie stosować irygacji dopochwowych.
- Przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowo (globulek, tabletek, czopków, maści) lub maści zewnętrznych.

POBIERANIE WYMAZÓW WYKONAĆ PRZY ZAŁOŻONYM WZIERNIKU

WYMAZY NALEŻY POBIERAĆ WG KOLEJNOŚCI (w zależności od zleconych badań)

I Wymaz na posiew mikrobiologiczny II Wymaz na biocenozę III Wymaz na badanie genetyczne STI/HPV

I. WYMAZ NA POSIEW MIKROBIOLOGICZNY – WYMAZ Z POCHWY

- Wyjąć wymazówkę z podłożem transportowym (niebieska nasadka) z opakowania ochronnego.
- Pobrać wymaz z tylnego sklepienia pochwy.
- Wymaz niezwłocznie umieścić w próbówce z podłożem transportowym.
- Próbkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjentki oraz datą i godziną pobrania.

II. WYMAZ NA BIOCENOZĘ

- Za pomocą suchej wymazówki oznaczonej BIOCENOZA, pobrać wymaz z tylnego sklepienia pochwy.
- Wymaz rozprowadzić na szkiełku podstawowym z opisem BIOCENOZA.
- Począć do wyschnięcia wymazu.
- Szkiełko umieścić w plastikowym opakowaniu ochronnym i zamknąć.

III. WYMAZ NA BADANIE GENETYCZNE Z KANAŁU SZYJKI MACICY

UWAGA: W ciąży wymaz z kanału szyjki macicy pobiera wyłącznie lekarz ginekolog, po stwierdzeniu braku przeciwwskazań.

- Wyjąć wymazówkę **COPAN eNAT** i próbkę z opakowania ochronnego (rys. III/1.).
- Oczyścić ujście szyjki macicy sterylną gazą, usuwając nadmiar śluzu.
- Wprowadzić wymazówkę na głębokość 1-2 cm do kanału szyjki macicy i kilkakrotnie nią obrócić.
- Wyjąć wymazówkę nie dotykając ścian pochwy i przenieść do próbki z płynem. Lekko dociskając wymazówkę do wewnętrznej ścianki próbki złamać ją (miejsce złamania jest lekko nacięte, co ułatwia tę czynność) (rys. III/2.).
- Zakręcić próbkę z płynem i wymazówką (rys. III/3.).

- Próbki z pobranym materiałem oraz szkiełko z BIOCENOZĄ włożyć do worka na materiał biologiczny i szczelnie zakleić.
- Maksymalny czas dostarczenia materiału do badania od momentu pobrania wynosi **48 h**.

Do czasu wysyłki wymazy należy przechowywać w lodówce.

IV. POMIAR pH

Zmierzyć wartość pH w pochwie za pomocą załączonego papierka lakmusowego poprzez wprowadzenie papierka lakmusowego do pochwy. Wartość pH należy zaznaczyć na skali, która znajduje się na karcie zlecenia wykonania badania. Po zapisaniu wartości, papierki lakmusowe wyrzucić.

Przesłanie materiału:

- Próbkę pobranego materiału należy umieścić w kartonie i przesłać na adres:

Instytut Mikroekologii
ul. Sielska 6
60-129 Poznań

Materiał do badania należy wysłać **na początku tygodnia** (poniedziałek-środa).

Uwagi: W przypadku temperatury powietrza powyżej +25°C proszę zabezpieczyć materiał wkładem chłodzącym.

- Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania). Zlecenie może być wypełnione zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.
- Wpłatę należy dokonać na następujący numer konta: **Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000**
Do przesyłki należy dołączyć dowód wpłaty za badania. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty, badania zostaną wstrzymane do momentu uiszczenia przez pacjenta należnej kwoty.

Dodatkowe koszty związane ze zrealizowaniem badania:

15 zł - wysyłka wydrukowanego wyniku na adres Pacjenta

120 zł - pełen pakiet - w tym: odbiór próbki materiału do badań przez kuriera (przesyłka medyczna)* i przesłanie jej na adres Instytutu Mikroekologii w Poznaniu oraz wysyłka wydrukowanego wyniku na podany przez Pacjenta adres.

- * Postępowanie przy wykupieniu opcji wysyłki próbki kurierem (przesyłka medyczna) znajduje się na dołączonej **Instrukcji przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera medycznego**.

UWAGA: sprawdź czy już nie dokonałeś opłaty za powyższe usługi na wcześniejszym etapie zamówienia.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikroekologii.

Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.

